

# Akcesoria do pielęgnacji stomii

Pełna gama produktów dla poprawy jakości życia pacjentów



# Askina® Barrier Film

Akcesoria do pielęgnacji stomii

- Dział badań i rozwoju B. Braun zajmujący się produktami do pielęgnacji stomii prowadzi nieustanne działania mające na celu poprawę jakości życia pacjenta, poprzez promowanie nowych technologii
- Szeroka gama produktów do pielęgnacji stomii zabezpiecza wszelkie potrzeby pacjenta poprzez zapewnienie komfortu, poczucia bezpieczeństwa i dyskrecji

„B. Braun zawsze  
po Twojej stronie !”



**Askina® Barrier Film**



**B. Braun DeOdore**



**B. Braun Adhesive Remover**



**B. Braun Ileo Gel+**



**Superfiller**

# Askina® Barrier Film

Niepowodująca podrażnień, szybko schnąca i przepuszczająca powietrza bariera ochronna skóry.



# Askina® Barrier Film

## Kiedy stosować środek Askina® Barrier Film?



- 1) W celu zapobiegania urazom skóry w wyniku obtarcia lub kontaktu z płynami**
  - Ochrona wrażliwych miejsc: pięt, łokci, palców u nóg, bioder- od pierwszych objawów zaczerwienienia wywołanych obtarciem
  - Ochrona skóry pacjentów z inkontynencją
- 2) W celu ochrony skóry narażonej na macerację i otarcia**
  - Skóra otaczająca ranę
  - Otoczenie stomii
  - Otoczenie miejsc drenażu i kontaktu skóry z cewnikiem zewnętrznym
- 3) W celu utrzymania integralności świeżo wygojonej skóry i ochrony przed ponownym urazem.**



Skóra narażona na podrażnienia: pacjent z inkontynencją



Zapalenie skóry u pacjenta z inkontynencją, z urazem skóry



Maceracja skóry w otoczeniu rany




Miejsce wprowadzenia drenu

## Łatwość, ekonomia i bezpieczeństwo użytkowania

- Nie powoduje pieczenia, może być stosowany na uszkodzonej skórze
- Szybko schnący: < 30s.
- Przezroczysty: umożliwia kontrolę wizualną
- Ekonomiczny: zapewnia 3-dniową ochronę
- Łatwość usuwania
- Poprawia adhezję opatrunków i taśmy mocującej
- Nie zmniejsza skuteczności pieluchomajtek dla pacjentów z inkontynencją
- Nie wpływają na siłę przylepności sprzętu stomijnego

### Całkowity brak pieczenia

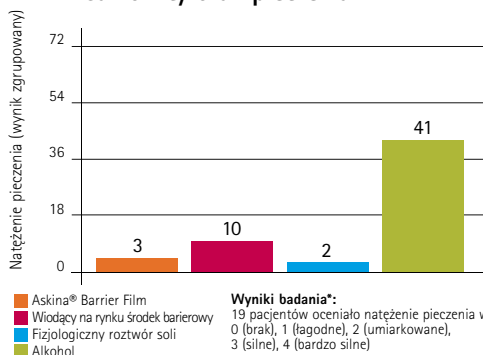


\* Dane z badań własnych

## Korzyści w pielęgnacji stomii

Podstawowa korzyść  
u pacjentów ze stomią:  
**Mniejszy ból podczas  
usuwania worka.**



### Opinie użytkowników dotyczące skuteczności ochrony skóry<sup>1</sup>

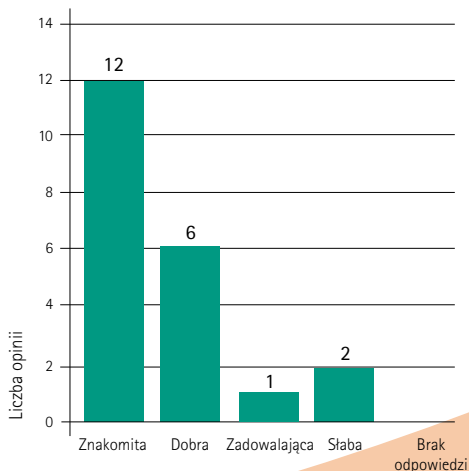

<sup>1</sup> W ankiecie wzięło udział 21 pacjentów\*

Podsumowując, 18 spośród 21 pacjentów oceniło produkt jako „Znakomity” lub „Dobry”.

Znaczne podrażnienie skóry w okolicach stomii w 1 dniu.



Dzień 1

Objawy podrażnienia prawie całkowicie ustąpiły w 15 dniu.



Dzień 15

Po 15 dniach stosowania produktu Askina® Barrier Film odnotowano wyraźne wygojenie skóry w okolicy stomii.



# Askina® Barrier Film

## Jak stosować produkt?



Umyć skórę w okolicy miejsca wyprowadzenia stomii z użyciem delikatnego mydła. Następnie delikatnie osuszyć skórę.



Pojemnik z produktem Askina® Barrier Film zbliżyć na około 10 do 15 cm do skóry w okolicy miejsca wyprowadzenia stomii, a następnie nałożyć niewywołującą pieczenia powłokę. Należy unikać nakładania produktu bezpośrednio na stomię.

W przypadku nakładania produktu Askina® Barrier Film na pofałdowaną skórę, należy delikatnie rozciągnąć i rozprostować skórę, nałożyć produkt. Przed zwolnieniem skóry i powrotem do pierwotnego stanu należy odczekać aż produkt wyschnie na skórze.



Odczekać 30 sekund aż spray wyschnie. Po tym czasie na skórze tworzy się cienka bariera ochronna.



Założyć zwykle stosowany sprzęt stomijny.

# Najczęściej zadawane pytania

## ■ Jak często można stosować produkt Askina® Barrier Film?

Bariera ochronna utrzymuje się przez 48 do 72 godzin, ale zaleca się stosowanie produktu każdorazowo przy zmianie worka stomijnego.

## ■ W jaki sposób można usunąć produkt Askina® Barrier Film?

Produkt Askina® Barrier Film można usunąć ze skóry za pomocą zwykłych medycznych zmywaczy do skóry lub delikatnej emulsji myjącej.

## ■ Czy produkt Askina® Barrier Film można stosować na uszkodzoną lub wrażliwą skórę?

Tak. Produkt nie zawiera alkoholu i może być bezpiecznie stosowany w celu zapewnienia bezbolesnej ochrony uszkodzonej, wrażliwej i delikatnej skóry.

## ■ Czy produkt Askina® Barrier Film można stosować u niemowląt?

Produkt Askina® Barrier Film może być stosowany u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia.

## ■ Jak dużą powierzchnię skóry pokrywa produkt?

Produkt Askina® Barrier Film w opakowaniu 28 ml starcza zwykle na 140 aplikacji, co wystarcza na jeden miesiąc.

## ■ Czy produkt Askina® Barrier Film wysusza skórę?

Testy biologiczne przeprowadzone z wykorzystaniem produktu Askina® Barrier Film oraz doniesienia naukowe potwierdzają, że produkt Askina® Barrier Film nie wysusza skóry.

Po nałożeniu na skórę produkt Askina® Barrier Film nie utrudnia skórze normalnego oddychania.

## ■ Czy w przypadku, kiedy skóra w okolicy wyprowadzenia stomii pod workiem stomijnym piecze i boli można stosować produkt Askina® Barrier Film?

Skóra w okolicy wyprowadzenia stomii jest uszkodzona wskutek częstej wymiany worków stomijnych, co może podrażniać skórę. Stosowanie produktu Askina® Barrier Film będzie chronić skórę i zapobiegnie jej uszkodzeniu, a tym samym zapobiegnie podrażnieniu i swędzeniu.

## Skóra w okolicy wyprowadzenia stomii



Dzień 1



Dzień 15



Po 15 dniach stosowania produktu Askina® Barrier Film można zaobserwować poprawę stanu skóry wokół miejsca wyprowadzenia stomii

# Askina® Barrier Film



## Informacje dla zamawiającego

Nr katalogowy	Pojemność	Ilość
4002801	28 ml Spray	1



# B. Braun DeOdour

Środek do neutralizacji zapachów dla pacjentów z wylonioną kolostomią i ileostomią



Pochłania przykre zapachy  
Bezzapachowy  
Pojedyncza dawka

# B.Braun DeOdour

B. Braun DeOdour wykonany jest w 100% z naturalnego minerału zeolitu. Jest to związek nieorganiczny o dużej porowatości posiadający zdolność do absorpcji gazów o nieprzyjemnym zapachu.

## Natychmiastowa skuteczność

- Duża pojemność wchłaniania, co zapewnia dłuższą wydajność.

## Łatwość użycia

- Łatwe umieszczanie wewnątrz worka.
- Pojedyncze opakowanie, niewielka i dyskretna saszetka.

B.Braun DeOdour daje pacjentowi pewność,  
a także podnosi jakość życia pacjenta



## Informacje dla zamawiającego

Numer katalogowy	Ilość sztuk w opak.
005013T	30

# Zmywacz do skóry

## B. Braun Adhesive Remover

Pozwala bez bólu usunąć ze skóry pozostałości przyklepca



Nie przylega, łatwy do usunięcia  
Do usuwania pozostałości przyklepca

NOWOŚĆ

# Zmywacz do skóry

## Zmywacz do skóry na bazie silikonu

■ Produkt typu 2 w 1

Formuła  
bezpieczna  
dla skóry



Usuwanie worka



Usuwanie pozostałości

- **Bardzo łatwy w użyciu**  
Przeprowadzone przez firmę B. Braun badania potwierdziły, że 83% pielęgniarek uznało, że produkt jest łatwy w użytkowaniu.  
100% pacjentów potwierdza, że usuwanie worków z wykorzystaniem zmywacza do skóry jest łatwiejsze\*.

- **Bez bólu**



Pielęgniarka: "Jest to moje niezbędne wyposażenie, nieodzowne w pielęgnowaniu pacjentów"



Pacjent: "To wspaniałe, można usunąć worek bezboleśnie; Po usunięciu worka nie ma żadnych pozostałości"



- **Łatwe dozowanie**

Dzięki butelce ze specjalną końcówką zmywacz można nakładać jak spray, co umożliwia aplikację pożądaną ilość.

## Informacje dla zamawiającego

Numer katalogowy	Ilość sztuk w opak.
AR5001	1 butelka o poj. 50 ml

# Ileo Gel+

Super absorbent do przekształcania wydzielin  
płynnych w stałe



Wydajny  
Łatwy w stosowaniu  
Dyskretny

# Ileo Gel+

Ileo Gel+ umożliwia pacjentom po ileostomii skuteczne i proste przekształcenie wydaliny płynnych do postaci żelu, co zapewnia im większą dyskrecję.

## Skuteczny

- Optymalne dozowanie: Jedna saszetka na około 180 ml wydzieliny

## Szybkie działanie

- Szybkie działanie: w ciągu 8 minut

## Łatwy w stosowaniu

- Pojedyncza kompaktowa saszetka: łatwa do wprowadzenia
- Łatwe opróżnienia worka
- Łatwe do stosowania opakowanie



## Swoboda działania ++

Odporność na przykre zapachy, dzięki procesowi żelowania:

- Zwiększona wydajność filtra
- Przykre zapachy zatrzymane przez żel

Dyskrecja:


brak odgłosów towarzyszących poruszaniu się płynu wewnątrz worka



Objętość początkowa:  
+/- 180ml

Łatwe rozwiązanie z zastosowaniem błony w 100% rozpuszczalnej w wodzie

Super absorbent w proszku

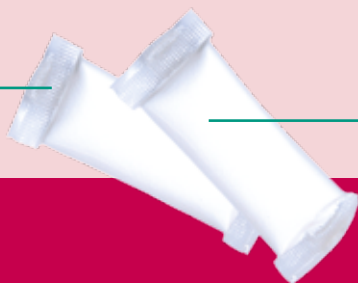

Ileo Gel+ nie zwiększa objętości zawartości worka

2



Proces przejścia cieczy do postaci stałej

3



Objętość końcowa:  
+/- 180ml



Szybkie działanie

# Ileo Gel+

Nowe i łatwe w użyciu opakowanie

## Informacje dla zamawiającego



Numer katalogowy	Ilość sztuk w opak.
005012T	45

„Opakowanie  
kieszonkowe”

Dostępne wewnątrz  
dozownika





# Superfiller

## Uszczelniająco-gojąca pasta stomijna

... żeby poczuć się bezpiecznie dniem i nocą



Do stosowania na nierówną skórę wokół miejsca wyprowadzenia stomii

# Superfiller


## Uszczelniająco-gojąca pasta stomijna

Dla pacjentów po wyłonieniu kolostomii, ileostomii i urostomii

Idealny do wypełniania pustych przestrzeni między fałdami skóry wokół miejsca wyprowadzenia stomii. Pozwala wydłużyć okres stosowania stosowania płytki lub worka stomijnego.



- Pasta łatwa do formowania i rozprowadzania. Pozostałości można łatwo usunąć.
- Stabilne i jednolite przyleganie
- **Zapobiega przed podrażnieniem skóry.** Chroni delikatną skórę wokół miejsca wyprowadzenia stomii przed wyciekami.
- **Zapobiega wyciekom.** Dobra odporność na rozpuszczanie warstwy pasty przez wycieki.
- **Zapewnia doskonałą barierę** i zwiększa bezpieczeństwo.

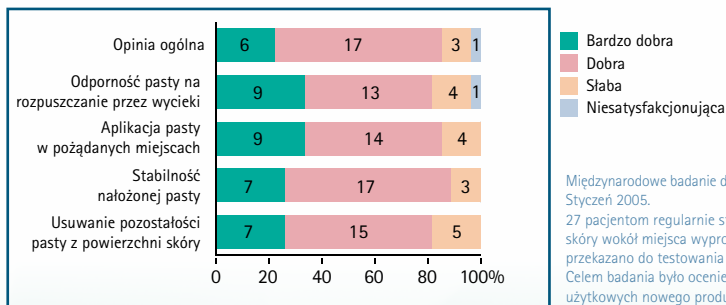

## Informacje dla zamawiającego

Numer katalogowy

F05008

Ilość sztuk w opak.

Tubka o poj. 60 g

# Pozostałe akcesoria do pielęgnacji stomii



## Prontoderm – roztwór myjący

- roztwór myjący bez potrzeby spłukiwania
- doskonała tolerancja skóry i błon śluzowych
- redukuje nieprzyjemne zapachy
- rekomendowany do długotrwałego stosowania
- nie wysusza skóry i błon śluzowych



## Braunovidon – maść gojąca

- zastosowanie do leczenia ran i wszelkich podrażnień
- posiada właściwości antybakteryjne
- osusza ranę wspomagając leczenie
- na powierzchni rany tworzy antyseptyczną powłokę
- posiada właściwości higroskopijne

# Aksesoria do pielęgnacji stomii

	Nr. kat	Ilość szt./opak.
Askina Barrier Film spray 28ml	4002801	1

	Nr. kat	Ilość szt./opak.
B. Braun DeOdore	005013T	30

	Nr. kat	Ilość szt./opak.
B. Braun Adhesive Remover spray 50ml	AR5001	1

	Nr. kat	Ilość szt./opak.
Ileo Gel +	005012T	45

	Nr. kat	Ilość szt./opak.
Superfiller tub. 60g.	F05008	1

	Nr. kat	Ilość szt./opak.
Prontoderm but. 0,5L	400102	1

	Nr. kat	Ilość szt./opak.
Braunovidon tub. 20g.	3883108	1

Materiały informacyjne

Zdjęcia: Getty Image

Dystrybutor: