

- 1.1 Nakłucie butelki i wypełnienie drenu
2. PRIME STOP znajdujący się na końcu drenu zabezpiecza przed wypływem płynu z drenu.



- 1.2 Dołączenie strzykawki w celu podania cytostatyku
2. Następnie dokręć wypełnioną cytostatykiem strzykawkę do zastawki SafSite®. Zastawka otworzy się automatycznie.



- 1.3 Wstrzyknięcie cytostatyku do butelki:
 2. Dozróż wymieszaj cytostatyki przez jednokrotną lub dwukrotną aspirację do strzykawki i powtórne podanie do butelki.
- Gdy odłączysz strzykawkę zastawka SafSite® zamknie się automatycznie.



- 1.4 Przygotowanie cytostatyku do podania
- Oznacz zastawkę SafSite® za pomocą czerwonego korecika COMBI. Kolor czerwony oznacza, że cytostatyki zostały rozpuszczone w butelce.



■ Przygotowanie cytostatyku (Cyto-Set® MIX)

Cyto-Set®

Cyto-Set®

Cyto-Set®

Bezpieczniejsze przygotowanie i podawanie cytostatyków.



Mniejsze ryzyko zakażenia cytostatyków

Plynoterapia

Przygotowanie	Typ	Nr katalogowy (REF)	Jedn. sprzedaży (szt.)
Cyto-Set® Mix	z zastawką SafSite®	A 2901 N	20
Cyto-Set® Line	bez zastawki SafSite®	A 2581 NF	20
Podział cytostatyku (grawitacyjnie)	Typ	Nr katalogowy (REF)	Jedn. sprzedaży (szt.)
Cyto-Set® Infusion	z 3 zastawkami SafSite®	A 1686	20
Cyto-Set® Infusion	z 5 zastawkami SafSite®	A 1685 SNF	20
Podział cytostatyku (za pomocą pomp)	Typ	Nr katalogowy (REF)	Jedn. sprzedaży (szt.)
Cyto-Set® Infusomat	z 3 zastawkami SafSite®	8250910	20
Cyto-Set® Infusomat	z 5 zastawkami SafSite®	8250812	20
Cyto-Set® Infusomat	z 5 zastawkami SafSite® oraz filtrem 0,2 µm	8250413	20
Cyto-Set® Pump Adapter	z 4 zastawkami SafSite®	A 1672 50	20
Aparaty do pobierania leku		Nr katalogowy (REF)	Jedn. sprzedaży (szt.)
Mini-Spike® V Chemo		4550587	50



ConComp® unikalne źródło informacji dotyczące kompatybilności leków, materiału z jakiego wykonane jest opakowanie leku i płynów poddawawych.

Odwiedź stronę: www.concomp-partner.com




2.1 Nakłucie butelki z płynem do przepłukiwania

1. Zamknij zacisk rolkowy i wprowadź kolec drenu do butelki
2. Podczas wypełniania drenu należy trzymać twardą część komory kropłowej do dołu. Otwórz zacisk rolkowy i wypełnij komorę do poziomu białego pierścienia.



2.2 Wypełnienie drenu Cyto-Set® INFUSOMAT

Jeżeli używasz pompy infuzyjnej Infusomat Space do podaży cytostatyku, wypełniaj dren, trzymając silikonowy segment Cyto-Set® INFUSOMAT czarnym elementem do góry.

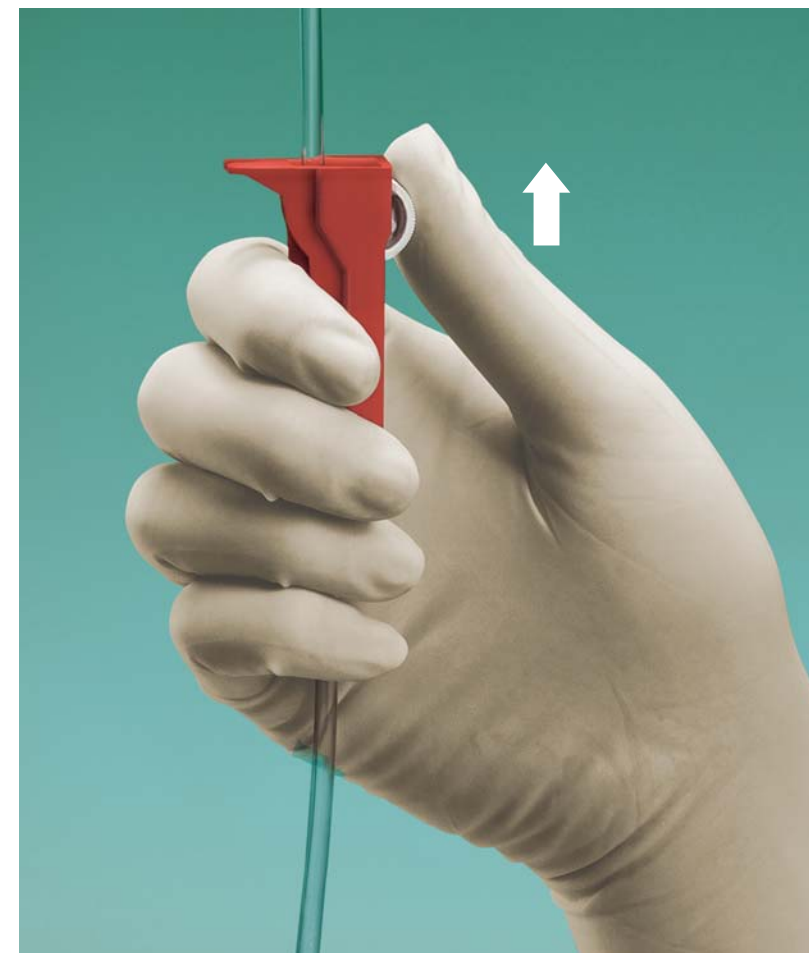

2.3 Podłączenie linii infuzyjnej do pacjenta

Otwórz zacisk rolkowy, wypełnij dren płynem do przepłukiwania drenu.



2.4 Podłączenie pierwszego drenu Cyto-Set® MIX

Odkręć koreczek z zastawki SafSite® na drenie Cyto-Set® INFUSION i zatyczkę Prime Stop z drenu Cyto-Set® MIX. Dokręć zielony łącznik drenu Cyto-Set® MIX jednym ruchem do zastawki SafSite®.

Wyczuwalne kliknięcie mówi, że zestawy drenów są bezpiecznie połączone.



2.5 Rozpoczęcie podaży cytostatyków

1. Zamknij zacisk na drenie do przepłukiwania Cyto-Set® INFUSION.
2. Otwórz zacisk na drenie Cyto-Set® MIX.



2.6 Przepłukanie drenu Cyto-Set® INFUSION

1. Po opróżnieniu butelki z cytostatykiem zamknij zacisk na drenie Cyto-Set® MIX w pobliżu zastawki SafSite®
2. Otwórz zacisk na drenie Cyto-Set® INFUSION, celem jego przepłukania



2.7 Podłączenie drugiego Cyto-Set® MIX

1. Zamknij zacisk na drenie do przepłukiwania Cyto-Set® INFUSION
 2. Otwórz zacisk na kolejnym drenie Cyto-Set® MIX
 3. Za pomocą zastawek Safsite® można połączyć od jednego do czterech różnych drenów Cyto-Set® MIX.
- Przeplucz dren za każdym razem po podaniu cytostatyków.



2.8 Zakończenie podaży cytostatyku

Po zakończeniu ostatniej infuzji cytostatyku, przepłucz zestaw ponownie. Zamknięty system odłącz od kaniuli dożyłnej, a następnie cały zamknięty zestaw z butelkami usuń.