

ARGYLE *

PEŁEN WYBÓR
BEZPIECZNYCH
ROZWIĄZAŃ




Aqua-Seal®

System trzykomorowy

tyco

Healthcare

ARGYLE*

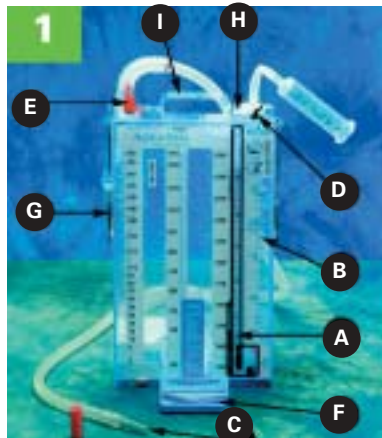


- A Komora zastawki podwodnej
- B Komora regulacji siły ssania
- C Łącznik z regulacją średnicy
- D Zawór zamknięcia
- E Manualna zastawka podciśnienia (przycisk)
- F Stojak
- G Wieszak metalowy
- H Automatyczna zastawka nadciśnienia
- I Zintegrowany uchwyt




Przygotowanie urządzenia 1. Napełnienie komory zastawki podwodnej

- Napełnij strzykawkę do pełna (około 45 ml płynu sterylnego).

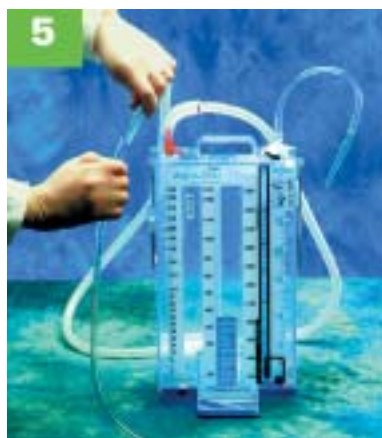

Przygotowanie urządzenia 4. Łączenie drenów i doprowadzenie do źródła ssania

- Zdejmij osłonkę z łącznika końcówki drenu bezłateksowego i połącz z drenem klatkowym (patrz rysunek). Zamocuj taśmą (patrz rysunek).
- Połącz przezroczysty dren znajdujący się nad komorą regulacji siły ssania (wejście u góry po prawej stronie urządzenia), ze źródłem ssania
- W celu sprawdzenia i regulacji ssania, przekręć czarny zawór w położenie otwarte, dopóki w komorze regulacji siły ssania nie wystąpi delikatne bulgotanie.

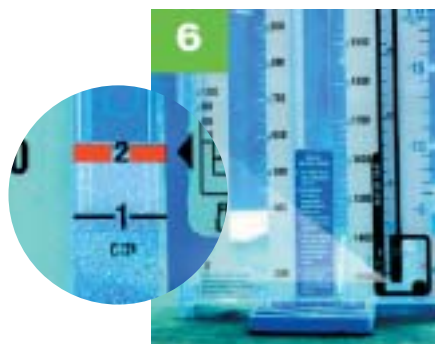

Karta oceny i działania

Komora zastawki podwodnej		Ocena i postępowanie
Zmiana poziomu płynu podczas cyklu oddechowego	Bulgotanie	
Tak	Tak	Wskazuje na istnienie... Im większy stopień... (odma opłucnowa...)
Nie	Nie	Wskazuje na zmniejszenie... poziomu płynu m... zagięte lub zatka... nie
Nie	Tak	Wskazuje na możliwość... odcinając przepły... nością połączenia... nie
Tak	Nie	Obserwuje się prz... związanych ze zm... nie



Przygotowanie urządzenia 2.

Napełnienie komory zastawki podwodnej

- Podnieś przyłączoną strzykawkę powyżej urządzenia Aqua-Seal, aby płyn spłynął do komory zastawki podwodnej, do linii 2 cm. Kolor wody zmieni się na niebieski.
- Usuń strzykawkę wraz z łącznikiem, z urządzenia.
- UWAGA - tak przygotowana komora zastawki podwodnej, umożliwia wykorzystanie urządzenia do drenażu grawitacyjnego.
- W celu regulacji poziomu płynu w komorze skorzystaj z portu regulacji komory zastawki podwodnej, znajdującego się na tylnej ścianie komory.



Przygotowanie urządzenia 3.

Napełnienie komory regulacji siły ssania

- Napełnij komorę regulacji siły ssania do uzyskania odpowiedniego poziomu słupa wody, odpowiadającego oczekiwanemu podciśnieniu, nalewając płyn sterylny bezpośrednio do białego otworu.
- Zamknij komorę regulacji siły ssania nakrywką widoczną przy otworze. Upewnij się, że "zaskakuje" szczelnie na swoje miejsce.



Wskazywanie błędów korygujących

Procedura w przypadku nieszczelności

W przypadku wystąpienia przecieku w optycznej i braku rozprężenia płuca. Wskazywanie błędów bulgotania i zmian poziomu płynu, tym większy jest przeciek (i tym większe spadnięcie płuca). Wskazywanie zwiększenia przecieku i rozprężanie się płuca. (Niewielkie zmiany mogą być obserwowane). Upewnij się, czy łączniki i dreny nie są nieszczelne. Sprawdź stopień rozprężenia płuca. Wskazywanie nieszczelności połączeń w układzie. Uciśnij dren klatkowy, w przypadku nieszczelności. Jeżeli bulgotanie trwa nadal, to mamy do czynienia z nieszczelnością. Umocuj poprawnie i uszczelnij taśmą wszystkie połączenia. Wskazywanie nieszczelności częściowej lub całkowitej resekcji płuca i stanach chorobowych zmniejszając podatność płuc (sztywne płuca).

Procedura obejścia (by-pass) komór regulacji siły ssania


- W celu uzyskania poziomu ssania większego niż 25cmH₂O potrzebne jest obejście komory regulacji siły ssania. Ssanie powinno się regulować przy pomocy regulatora próżni albo przenośnej pompy ssącej.
- Zamknij otwór na górze komory regulacji siły ssania załączonym korkiem.
- Podłącz źródło ssania.
- Przekręć czarny zawór w położenie: otwarte (obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
- Wyreguluj siłę ssania ze źródła ssania; do uzyskania pożądanego podciśnienia w systemie.



Dostępny także z dwiema komorami zbiorczymi



Widok od tyłu: Port regulacji zastawki podwodnej

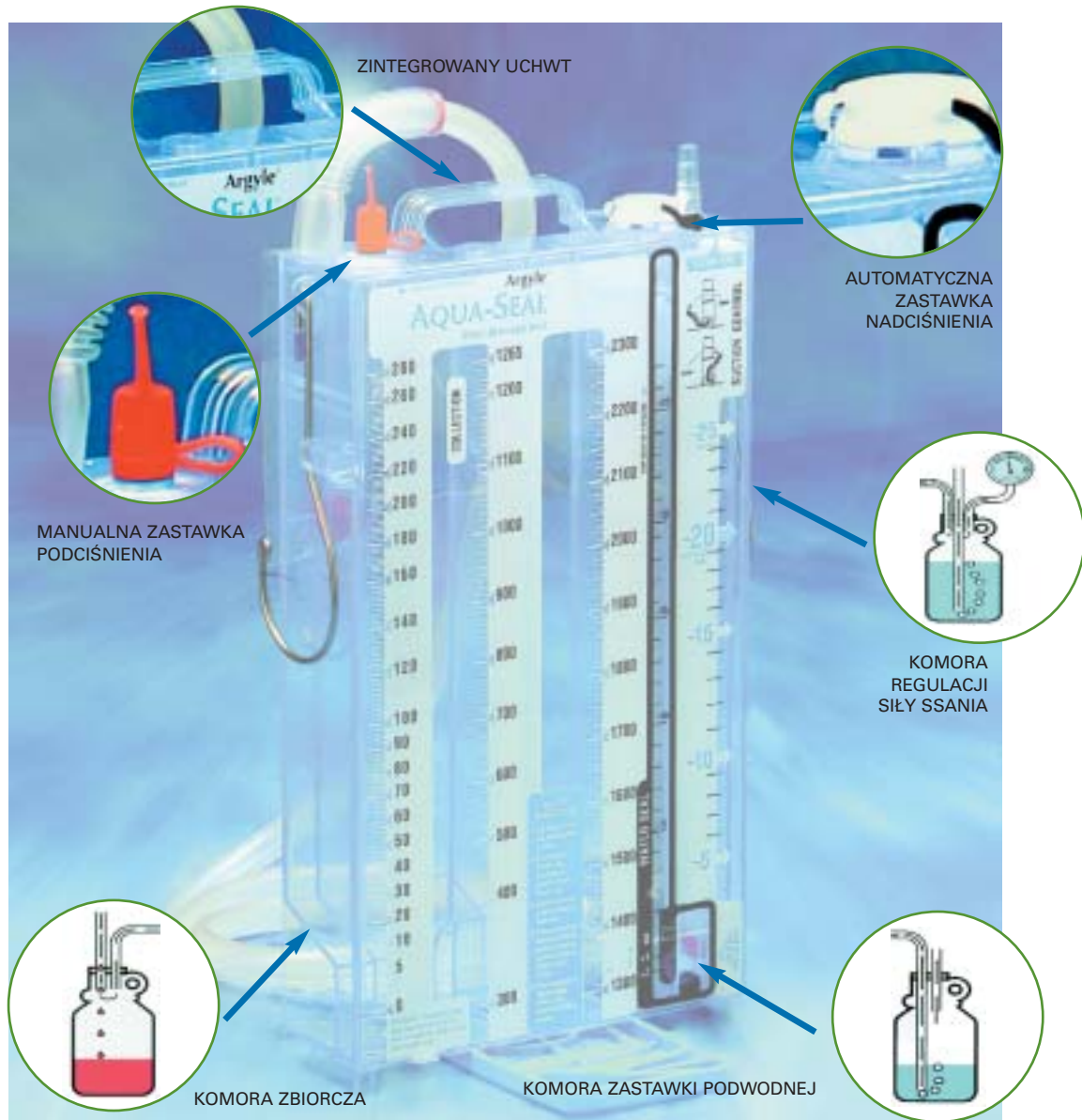

Aqua-Seal® - Specyfikacja produktu

OZNACZENIE	OPIS PRODUKTU	KOMORA ZBIORCZA	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
8888-571299	Aqua-Seal	2300 ml	5
8888-571406	Podwójna komora zbiorcza Aqua-Seal	1265 i 1050 ml	5

CE
0050

Znak towarowy Sherwood Service AG. Produkcja: Tyco Healthcare Ireland Limited.
© 2002 Tyco Healthcare. All rights reserved

M-AqS/Pol

tyco
Healthcare

Tyco Polska Sp. z o.o.
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
Polska
Tel. (+48 22) 668 71 17
Tel. (+48 22) 668 71 29
Fax. (+48 22) 658 40 61

www.tycohealthcare.com

ARGYLE*