



**COVIDIEN**

*positive results for life™*

## Pompa do żywienia dojelitowego Kangaroo™ Joey Instrukcja plecaka



**1**  
Zainstaluj zestaw w pompie zgodnie z instrukcją producenta



**2**  
Umieść pompę w kieszeni elastycznej w prawej dolnej części plecaka, przewlekając oba dreny – pacjenta i zestawu przez otwór po lewej stronie kieszeni



**4**  
Podłącz zestaw pompy do zbiornika z mieszanką pokarmową



**7**  
Przewlec dren zestawu pompy przez otwór po lewej stronie plecaka



**8**  
Dokonaj wstępnego napełnienia zestawu i wprowadź parametry programu podawania pokarmu zgodnie z instrukcjami producenta i lekarza



**9**  
Połącz dren do podawania pokarmu z urządzeniem dostępowym i rozpocznij podawanie pokarmu zgodnie z instrukcjami lekarza

COVIDIEN POLSKA SP. z o.o., AL. JEROZOLIMSKIE 162, 02-342 WARSZAWA, POLSKA  
+ 48 223060034 [T] + 48 223060035 [F] CSPOLAND@COVIDIEN.COM [E]

COVIDIEN, COVIDIEN wraz z logo, logo Covidien i *positive results for life* są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Covidien zarejestrowanymi w USA i poza granicami USA. Inne marki są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Covidien. © 2011 Covidien.

[WWW.COVIDIEN.COM](http://WWW.COVIDIEN.COM)  
[WWW.KANGAROOPUMPTRAINING.COM](http://WWW.KANGAROOPUMPTRAINING.COM)

MS\_2011\_JP\_0281\_PL