



Omniflush® –  
Strzykawka z solą  
fizjologiczną do  
przepłukiwania  
kaniul dożylnych i  
cewników

Nowy portal  
[www.bezpiecznalinianaczyniowa.pl](http://www.bezpiecznalinianaczyniowa.pl)

## TWÓJ SZCZĘŚLIWY WYBÓR

PROSTE. BEZPIECZNE. OMNIFLUSH®

# Omniflush® - Strzykawką z solą fizjologiczną do przepłukiwania kaniul dożylnych i cewników

Do wstecznego przepływu krwi dochodzi w przypadku gdy cały płyn zostaje usunięty ze standardowej, trzyczęściowej strzykawki, a jej tłok jest całkowicie dociśnięty do dna cylindra strzykawki, a następnie zwolniony. Po odskoczeniu końcówki tłoka strzykawki powstaje próżnia wciągająca krew z powrotem do światła cewnika. Okluzja światła cewnika w przypadku wstecznego przepływu krwi jest istotnym problemem klinicznym.<sup>1</sup>

Strzykawka Omniflush® została specjalnie zaprojektowana, by zminimalizować niezamierzony wsteczny przepływ krwi do światła cewnika, zmniejszając ryzyko jego zatkania.

1. Flushing vascular access catheters: Risks for infection transmission by Lynn Hadaway, RN, C, MEd, CRNI. Infection Control Resource, Vol. 4 No. 2.



Rozmiar strzykawki ma wpływ na ryzyko uszkodzenia cewnika. Strzykawki o mniejszych średnicach generują większe ciśnienie działające na ścianki cewnika podczas wstrzykiwania, niż strzykawki o większych średnicach.<sup>2</sup> Strzykawka Omniflush® dostępna jest w pojemnościach 3 ml, 5 ml i 10 ml. Średnica wewnętrzna cylindra strzykawki dla każdej pojemności jest identyczna, jak w przypadku standardowej strzykawki B. Braun o pojemności 10 ml.

Dzięki większej średnicy wewnętrznej cylindra strzykawki Omniflush® uzyskuje się mniejsze ciśnienie płukania w porównaniu ze standardowymi strzykawkami 3 ml lub 5 ml, co zmniejsza ryzyko pęknięcia cewnika.

2. Flushing vascular access catheters: Risks for infection transmission by Lynn Hadaway, RN, C, MEd, CRNI. Infection Control Resource, Vol. 4 No. 2.



Nazwa produktu	Objętość płynu	Objętość strzykawki	Ilość w opakowaniu	Numer produktu
Omniflush®	10 ml	10 ml	100	EM-3513576
Omniflush®	5 ml	10 ml	100	EM-3513575
Omniflush®	3 ml	10 ml	100	EM-3513572
Omniflush® Sterile Field	10 ml	10 ml	35	EM-3570660

AESULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,  
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | [www.chifa.com.pl](http://www.chifa.com.pl)

AESULAP CHIFA - firma grupy B. Braun

HC-BLN-022 10/2016