



PureSite - Urządzenie do transferu leków niebezpiecznych i toksycznych. Przeznaczone jest do używania ze strzykawkami i wyrobami wyposażonymi w złącze typu luer lock.

**CHROŃ SIĘ PRZED LEKAMI
TOKSYCZNYMI- UŻYWAJ PURESITE**

W

CHROŃ SIĘ PRZED LEKAMI TOKSYCZNYMI - UŻYWAJ PURESITE

PRZYGOTOWANIE LEKU



Połącz żeńską końcówkę luer lock PureSite ze strzykawką.



Po połączeniu PureSite z dojściem bezigłowym, odwróć fiolkę, w celu pobrania leku.



Nałóż nasadkę ochronną na końcówkę męską PureSite.

PODANIE LEKU



Po zdjęciu nasadki ochronnej, połącz PureSite do dojścia bezigłowego.



Po podaniu leku, odłącz PureSite od dojścia bezigłowego.



Wyrzuć strzykawkę z PureSite zgodnie z zaleceniami.

Klasyfikacja leków niebezpiecznych wg NIOSH*

GRUPA 1

substancje rakotwórcze dla człowieka

afatanibpaklitaksel, aktywinibpertuzumab, amsakrynapolamidomid, bendamustynaregorafenib, bleomycynawemurafenib, karboplatyna, carfilzomib, cisplatyna, cyklofosfamid, desatinib, epirubicyna, etopozyd, 5-fluorouracyl, imatinib, nilotinib, thiotepa, pomalidomid

PURESITE - urządzenie transferowe (4551105)

GRUPA 2A

substancje prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka

karmustyna, chloramfenikol, cisplatyna, doksorubicyna, tenipozyd

PURESITE - nasadka ochronna (4551101)

*STANDARZY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO. 2018

AESCLAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | www.chifa.com.pl

AESCLAP CHIFA - firma grupy B. Braun

HC-BLN-015 01/2020