



Surecan® Safety II  
jest przeznaczona  
do stosowania  
przez okres do 7 dni

SwabCap®  
utrzymuje  
powierznię  
zaworu w stanie  
zdezynfekowanym  
przez okres do 7 dni

ZMIANY ZACZYNAMY  
OD MARZEŃ

# BEZPIECZNY. BEZIGŁOWY. BEZ RYZYKA. PROCES PODANIA LEKU PRZEZ PORT NACZYNIOWY



**1** Połącz zawór bezigłowy Ultrasite® z portem bocznym zestawu do przetoczeń.



**2** Przepłucz zestaw do przetoczeń roztworem soli fizjologicznej i zamknij zacisk.




**3** Wktuj igłę do portu, zwolnij zacisk i sprawdź refluks (w drenie i strzykawce pojawi się krew). Zaciśnij zacisk i zdejmij strzykawkę z portu głównego.



**4** Podłącz drugą strzykawkę do portu głównego, zwolnij zacisk i przepłucz port roztworem soli fizjologicznej.



**5** Wyjmij korek SwabCap® z toka strzykawki.

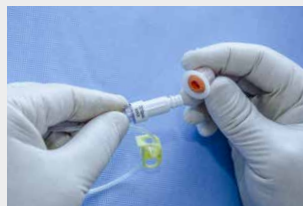

**6** Umocuj korek na zaworze bezigłowym trzymając za białą oprawkę.



**7** Usuń białą oprawkę z korka.



**8** Korek SwabCap® dezynfekuje zawór przez 30 sekund i utrzymuje zdezynfekowaną powierzchnię zaworu do siedmiu dni, jeśli nie zostanie usunięty.



**9** Surecan® Safety II jest przeznaczona do stosowania przez okres do 7 dni