

## Schemat przygotowania infuzji preparatu wielowitaminowego Viantan® i pierwiastków śladowych Tracutil® w 250ml 0,9% NaCl z wykorzystaniem Ecoflac® Connect.




Otwórz ampulkę Tracutil® i pobierz jej zawartość do strzykawki za pomocą rurki z filtrem 5 µm



Przymocuj igłę (zwykłą – jeżeli wcześniej pobrano preparat za pomocą rurki z filtrem lub igłę z filtrem 5 µm jeżeli nie użyto rurki z filtrem)



Zdejmij zabezpieczenie ochronne z portu butelki Ecoflac® plus (nie wymaga dezynfekcji przy pierwszym użyciu)

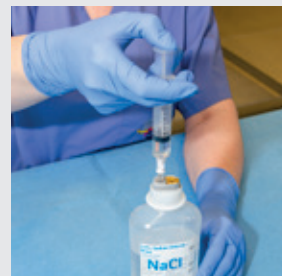

Dostrzyknij Tracutil®



Wymieszaj roztwór po usunięciu igły



Zdejmij ochronny kapsel z fiolki Viantan® i zdezynfekuj powierzchnię portu



Zdezynfekuj port Ecoflac® plus przed ponownym użyciem (zgodnie z zasadami: uprzednio wykorzystany port wymaga dezynfekcji przed kolejnym użyciem)



Połącz Ecoflac® Connect z pojemnikiem Ecoflac® plus tworząc System Zamknięty



Połącz fiolkę Viantan® z Ecoflac® Connect



Rozpuść Viantan® naciskając Ecoflac® plus obydwiema rękami \*



Wymieszaj roztwór



Odwróć Ecoflac® plus i ściskając butelkę pobierz lek do opakowania Ecoflac® plus



Zdejmij zabezpieczenie ochronne z drugiego portu butelki Ecoflac® plus



Podłącz aparat Intrafix® SafeSet z zaworem BCV tworząc System Zamknięty



Wypełnij komorę kroplową Intrafix® SafeSet oraz dren aparatu; preparat gotowy do podania Pacjentowi

\* Co najmniej 5 ml wody do wstrzykiwań, 0,9% NaCl lub 5% glukozy należy dodać do fiolki w celu ostworzenia tak aby menisk rozpuszczalnika osiągnął górny poziom etykiety

